



CHECK-LIST CEC

DATE :

IDENTIFICATION PATIENT :

CEC N°

MATÉRIEL A USAGE UNIQUE

DATES DE PÉREMPTION
TÉMOINS DE STERILITE
INTEGRITE DES EMBALLAGES
CONFORMITÉ SCHÉMA
ÉTIQUETTES TRACABILITE COLLÉES

CONSOLE CEC

BRANCHEMENT SECTEUR
RELAIS BATTERIE
PRÉSENCE MANIVELLE
CLAMPS FONCTIONNELS
CHARIOT CEC COMPLET

GENERATEUR THERMIQUE

BRANCHEMENT SECTEUR
POMPE FONCTIONNELLE
CONTROLE NIVEAU EAU
CONNECTION ÉCHANGEUR THERMIQUE
ABSENCE DE FUITE
CONTROLE CHAUD-FROID

FLUIDES MÉDICAUX

BRANCHEMENT AIR-02
ABSENCE DE FUITES

MONITORAGE

CHRONOMETRES FONCTIONNELS
PRESSIONS CALIBRÉES
MESURES EN LIGNES CALIBRÉES
SONDES DE TEMPÉRATURES CONNECTÉES

MONTAGE CEC

OCCLUSIVITE DES POMPES
ARTÉRIELLE
CARDIOPLEGIE
ASPIRATIONS
MOBILITÉ DES GALETS
SENS DE ROTATION DES GALETS
CENTRIFUGE: ZÉRO DEBIMETRE
DÉTECTEUR DE NIVEAU CONNECTE
DÉTECTEUR DE BULLES CONNECTE
OXYGENATEUR FIXE
CONNECTION LIGNE DE GAZ

CONTRÔLE ULTIME

VÉRIFICATION DU CIRCUIT
DEBULLAGE
ABSENCE DE FUITES
SENS DE ROTATION DES GALETS
VÉRIFICATION POMPE CENTRIFUGE
VÉRIFICATION DÉTECTEUR DE NIVEAU
MONITORAGE DES PRESSIONS
CONTRÔLE DÉBIT DES GAZ
POUSSES SERINGUES FONCTIONNELS
MISE EN ROUTE GENERATEUR THERMIQUE
INJECTION HEPARINE
TCA POST HEPARINE

DÉMARRAGE CEC POSSIBLE



NOM ET SIGNATURE DU PERFUSIONNISTE

OBSERVATIONS